


SWG - Gebrauchshinweise


1.

Nach dem Absetzen der Kontaktlinse vom Auge, legen Sie diese in den für OPEN 30 Kontaktlinsen zugelassenen Behälter. Fixieren Sie den Behälter mit Hilfe des mitgelieferten Adapters (Klammer mit Metallplättchen) auf dem Vibrationsgenerator (**SWG**). Füllen Sie ausreichend Flüssigkeit in den Behälter und verschließen Sie die Deckel dicht. Das **SWG** kann waagrecht aufgestellt, oder optional auch senkrecht, mit Hilfe des befestigten Saugers, an z.B. einem Badezimmerspiegel (siehe Bild) befestigt werden. Auch waagrecht benutzt, verhindert der Sauger ein unerwünschtes "Wandern" während des Einsatzes auf glatten Oberflächen.

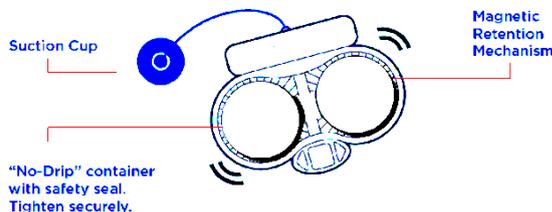

2.

Es ist unbedingt empfohlen, die volle Reinigungsfunktion (extended clean function) täglich durchzuführen. Einfach den rechten Knopf (extended) drücken und der Reinigungszyklus beginnt automatisch. Das Gerät startet mit einer 16-sekündigen Vorspülung, gefolgt von einem 6-stündigen Reinigungsvorgang. Während dessen Verlauf wird die verbleibende Zeit auf dem Display angezeigt. Um diesen Vorgang zu unterbrechen, drücken Sie einfach einen der beiden Knöpfe. Ansonsten schaltet das Gerät nach 6 Stunden automatisch ab.

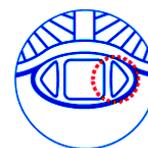

3.



Optional – Die Kontaktlinse kann während der Tragephase oder nach dem vollen Reinigungszyklus, durch Drücken des linken Knopfes, mit einer Schnellspülung aufgefrischt werden. Nach dem Knopfdruck erfolgt eine 16-sekündige Spül- und Auffrischungsphase. Anschließend können Sie die Kontaktlinse wie gewohnt einsetzen.

Während sich das Gerät im Ruhemodus befindet, wird auf dem Display die verbleibende Anzahl der Tage gezeigt, nach denen die Kontaktlinse ausgetauscht werden muss. Wenn Sie diesen Wert verändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a. Um die Zahl zurückzustellen, drücken Sie bitte kurz beide Knöpfe (rechts und links) gleichzeitig. Das Gerät stellt die Zahl auf 14 (Grundeinstellung) zurück.
 - Drücken Sie beide Knöpfe gleichzeitig, um den Tageszähler einzustellen.
 - Drücken Sie (< 1sec.) um auf die ursprüngliche Zahl zurückzustellen. Das Gerät piept 3 mal.
 - Drücken Sie (>1sec.) um die Grundeinstellung zu ändern. Das Display blinkt zum Einstellen.
- b. Wenn gewünscht (bitte die Empfehlung des Kontaktlinsenherstellers beachten), kann der Tageszähler zwischen 01 und 99 eingestellt werden. Zum Justieren (nur das erste Mal notwendig), führen Sie Schritt A durch. In diesem Falle halten Sie beide Knöpfe länger als 1 Sekunde gedrückt. Das Display blinkt und zeigt die Grundeinstellung. Drücken Sie nun den rechten oder linken Knopf, um die Zahl höher oder niedriger einzustellen.

Nach 5 Sekunden ohne Veränderung, hört das Display auf zu blinken und das Gerät speichert die neue Anzahl Tage als Standard. Wenn notwendig, kann der Schritt beliebig wiederholt werden.
- c. Wenn der Tageszähler 00 anzeigt, sollten Sie aus Komfort- und Sicherheitsgründen Ihre Kontaktlinse, der Herstellerinformation gemäß erneuern.

5.

Wenn das Gerät während der Ruhezeit (Tageszähler) 'LO' anzeigt, sollten Sie die Batterie (AAA) möglichst bald austauschen, da ansonsten das Gerät nicht zuverlässig funktioniert.

6.

DAS GERÄT IST NICHT WASSERDICHT

Legen Sie das **SWG** nicht direkt ins Wasser, oder versuchen Sie das Gerät zu waschen. Falls doch, erlischt die Garantie. Falls das Gehäuse des Geräts defekt sein sollte, achten Sie bitte darauf, es nur auf trockenen Flächen zu lagern, oder hängend zu befestigen. Das **SWG** widersteht hoher Luftfeuchtigkeit, sollte aber vor Kondenswasser geschützt werden.