

Gebrauchsanleitung Sonic Wave Generator 2.0

- 1 Legen Sie die Kontaktlinsen in den passenden Kontaktlinsenbehälter und füllen Sie die einzelnen Aufbewahrungsdepots zu mindestens 80% des vorgesehenen Volumens, mit der für Ihre Kontaktlinsen zugelassenen Aufbewahrungsflüssigkeit, auf.
- 2 Legen Sie das SWG2.0 auf eine glatte Tischplatte, Badezimmertisch oder fixieren Sie es mit Hilfe des kleinen Saugers an einem Spiegel (Vertikale Anbringung ist auch möglich). Um das Vibrationsgeräusch zu mindern, können Sie das SWG2.0 auch auf einem weichen Tuch platzieren.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Funktion, indem Sie Ihre Fingerspitze auf die jeweilige Magnetfläche legen. Rechts=Extended (6 Stunden), oder Links=Rapid (16 Sek.) Falls Sie keine Funktion auswählen, wird der zuletzt gewählte Zyklus wiederholt.
- 4 Legen Sie den Kontaktlinsenbehälter direkt auf die Reinigungs-Plattform. Warten Sie 1-2 Sekunden, bis der Computer die eingefüllte Flüssigkeitsmenge analysiert hat. Ist die Flüssigkeitsmenge ausreichend, startet das Gerät automatisch. Ist die Flüssigkeitsmenge grenzwertig, warnt das Gerät durch Blinken, bevor es startet. Ist die eingefüllte Flüssigkeitsmenge zu gering, startet das Gerät nicht. Nachdem der komplette Reinigungsprozess abgeschlossen ist, schaltet das Gerät automatisch ab.

Hinweise:

Dieses Gerät verfügt über KEINE mechanischen Tasten und arbeitet vollautomatisch. Für korrekte Funktion, beachten Sie bitte diese einfachen Punkte (bitte vor dem ersten Gebrauch das Gerät ca. 2 Stunden aufladen).

Das Gerät ist NICHT Wasserdicht, deshalb bitte nicht in Wasser tauchen. Da das Gerät versiegelt ist, bitte nicht versuchen zu öffnen.

Anmerkungen:

Der Reinigungsmodus kann jederzeit durch entfernen des Kontaktlinsenbehälters, oder durch gleichzeitiges Berühren der Rechts/Links Magnetflächen, unterbrochen werden.

Die jeweilig zuletzt ausgeführte Funktion ist gespeichert und wird bei Neustart wiederholt (Rechts-Extended, Links-Rapid), kann jedoch umgestellt werden. Zum Ändern bitte mit Daumen oder Zeigefinger die jeweilige Fläche 1-2 Sekunden berühren, bis das entsprechend LED aufleuchtet. Rapid = 16 Sekunden Spülen; Extended = 6 Stunden Reinigen (Vibrationsphase alle 15 Minuten).

Der 30-Tage Timer (Display) kann durch gleichzeitiges Berühren der beiden Magnetflächen (R/L) zurückgestellt werden. Das Gerät bestätigt das Zurückstellen der Anzeige auf 30 Tage, mit kurzem Blinken.

Denken sie bitte daran, das Gerät mindestens einmal monatlich, oder bei Bedarf aufzuladen. Das Gerät schaltet bei entleerter Batterie selbsttätig ab. Alternativ können Sie das Gerät, wie ein Smartphone, ständig an einem USB-Mikro Ladegerät angeschlossen lassen. Bei vollständig entleerter Batterie dauert der komplette Ladevorgang ca. 2 Stunden.

Problembehandlung:

Bedenken Sie bitte immer, dem Gerät Zeit zum Analysieren und Reagieren zu geben. Nach einem Programmwechsel oder dem Entfernen des Kontaktlinsenbehälters, warten Sie bitte 2-3 Sekunden bis zum Neueinsatz. Ein ZU SCHNELLER Neustart kann die Genauigkeit der Flüssigkeitsanalyse herabsetzen.

Falls das Gerät definitiv nicht reagiert, versuchen Sie bitte folgendes:

1. Berühren Sie bitte mit Ihren Fingerspitzen die R/L Flächen gleichzeitig. Dies ist der generelle „Enter/ Esc“ Befehl für dieses Gerät.

2. Versuchen Sie, das Gerät erneut aufzuladen. Das grüne LED zeigt verfügbare USB Spannung, das orangefarbene LED zeigt den Ladevorgang an. Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt das orangefarbene LED.

3. Bei anhaltenden Einschaltproblemen oder ständig blinkenden LEDs im „Standby“ Zustand, legen Sie das Gerät bitte auf eine andere Oberfläche oder, gegebenenfalls, weg von anderen elektrisch betriebenen Apparaten.

Es wird empfohlen, das beiliegende USB Kabel zum Aufladen des Gerätes zu verwenden. Falls Sie beim Aufladen Probleme haben, versuchen Sie bitte eine andere USB Stromquelle (Computeranschluss, Telefonladegerät mit USB-Mikro Stecker, etc.). Der Ladestrom beträgt ca. 200mA, welcher mit USB V1.0 und darüber liegenden Versionen, somit jedem Standard USB Anschluss, kompatibel ist.

Der magnetische Adapter für den Kontaktlinsenbehälter ist wiederverwendbar. Zum erneuten Verwenden, einfach die kleinen Kunststoffhalterungen aus den Rasten des benutzten Behälters lösen und auf einen neuen Safilens Kontaktlinsenbehälter klicken.

Die Lebenszeit des geschützten und abgesicherten Lithium-Ionen-Akkus beträgt normalerweise ca. 500 komplette Aufladungen. Die Leistung beträgt 3.7V / 350mAh.

The infographic is divided into four quadrants. The top-left quadrant is titled 'RAPID' and shows a hand holding a blue device with a clock icon indicating '16 sec.'. The top-right quadrant is titled 'EXTENDED' and shows a hand holding the device with a moon and 'Z' symbols indicating '6 hrs.'. The bottom-left quadrant is titled 'RESET' and shows two hands holding the device. The bottom-right quadrant shows a USB cable connected to the device, with a legend for 'Charging' (orange dot) and 'Full charge' (green dot), and text stating 'Fully recharged in ~2 hours'. At the bottom center, it says 'SWG 2.0 - Sonic Wave Generator is powered by JitterBug™'. The website 'www.safilens.com' is at the bottom.